



LOFTEX[®]-SERVETĖLĖS

SERVETĖLĖS VALYMIUI IR DEZINFEKIJAI

Saugiam ir higieniniam daiktų bei paviršių valymui / dezinfekcijai ligoninėse, slaugos namuose, medicinos praktikoje, laboratorijose, virtuvėse, sanitarinėse patalpose, farmacijos ir maisto pramonėje.

Naudojimo vietos: vietos, kuriose yra ir nėra infekcijos rizikos, ar yra tikėtina infekcijos rizika. Impregnuotos paviršių dezinfekcijos tirpalu servetėlės LOFTEX -Wipes, gali būti naudojamos iki 28 dienų.

Naudojimas:

- 1) Dėvėkite pirštines ir dezinfekuokite darbo paviršių.
- 2) Atidarykite dangtelį ir lėtai įpilkite apie 2,0 - 2,5l paruošto naudoti dezinfekcinio tirpalo iš viršaus nuo servetelių centro link kraštų.
- 3) Ištraukite servetelę iš centro ir iškiškite pro dangtelio viduryje esančią angą.
- 4) Saugiai uždėkite dangtelį, palikdami šiek tiek iškištos servetėlės per angą, kad būtų patogiau ištraukti.
- 5) Paženklinkite etiketę markeriu. Maždaug po 20 min. LOFTEX -Wipes servetėlės bus pilnai sudrėkusios ir paruoštos naudoti.
- 6) Po paruošimo ir atidarymo LOFTEX servetėlės reikia sunaudoti per 28 dienas. Neskirta naudoti invazinių medicinos prietaisų dezinfekcijai. Perskaitykite pasirinkto dezinfektanto naudojimo instrukciją. Nenaudokite išdžiūvusių/išsausėjusių servetelių.
- 7) Išmesti pasibaigus naudojimui arba kibirėlį dezinfekuoti ir naudoti toliau.

90 servetelių,
dydis: 29x32 cm

Importuotojas: UAB „Goodpoint“
Birželio 23-iosios g. 23F,
LT-50220, Kaunas, Lietuva
El.p.: info@medsauga.lt / www.gpoint.lt